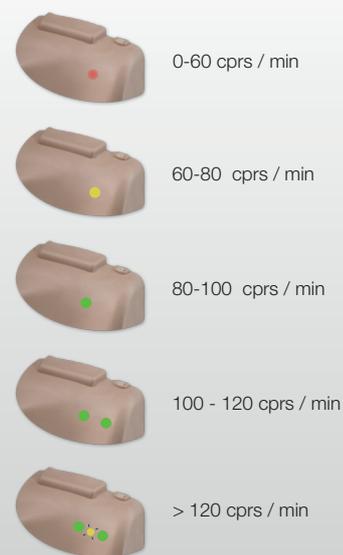


**MONITEUR DE FREQUENCE**

Mannequin Adulte PRESTAN

(Mannequin de formation Adulte PRESTAN : PP-AM-100M)

Réaliste à l'oeil et au toucher, le mannequin de formation PRESTAN donne une évaluation immédiate de la qualité du massage cardiaque effectuée. Le moniteur de fréquence indique au stagiaire en temps réel s'il effectue les compressions au bon rythme et à une profondeur correcte.

Economique, le Mannequin PRESTAN utilise une voie respiratoire (poumons) pour une formation et un protecteur facial avec filtre anti retour par stagiaire.

Les formateurs apprécieront également la simplicité de montage et d'entretien du mannequin. Facilement transportable, le mannequin de formation PRESTAN (2,2 kg) est livré avec un sac de transport matelassé.

» Mannequin conforme aux nouvelles recommandations PSC1 et SST 2012 - GARANTIE 3 ANS

Mannequin Adulte PRESTAN

(Mannequin de formation Adulte PRESTAN : PP-AM-100M)

COMPRESSIONS

Le mannequin professionnel Prestan dispose de repères anatomiques simulés réalistes comprenant les clavicules, une ligne mamelonnaire précise, le sternum et un processus xiphoïde apparent. De plus, la position du nombril permet d'enseigner les compressions abdominales de façon réaliste.

Conformément aux directives ERC 2010, la poitrine du mannequin professionnel Prestan peut être compressée jusqu'à une profondeur comprise entre 5 et 6 centimètres. Un retour audio est fourni quand la profondeur des compressions effectuées se situe entre 5 et 6 centimètres. La force requise pour effectuer des compressions sur le mannequin a été mesurée à 40 kg.

DEFIBRILLATION

Les dimensions de la cage thoracique, de la structure du sternum et du thorax dans la zone de la poitrine ont été spécialement étudiées pour l'application d'électrodes pour défibrillateur de formation (DAE de formation).

CAPACITE PULMONAIRE

Le mannequin professionnel Prestan peut supporter une insufflation de 700/1000 ml, ce qui entraîne le soulèvement de sa poitrine. La poitrine se soulève également de façon visible pour un volume respiratoire de 500/600 ml.

VOIES RESPIRATOIRES

Le mannequin professionnel Prestan comporte une fonction unique permettant d'incliner sa tête et de relever son menton, actions qui doivent obligatoirement être effectuées afin d'ouvrir les voies respiratoires du mannequin. La tête du mannequin a également été conçue pour ne pas rester en position inclinée à moins d'être tenue ou inclinée de nouveau pour les insufflations suivantes.

RESPIRATION

Le mannequin professionnel Prestan fournit une fonction de respiration artificielle, avec ou sans barrières de protection, permettant aux participants d'utiliser un BAVU, un masque de poche et diverses autres barrières de protection. Le mannequin professionnel Prestan peut également être utilisé avec son protecteur facial avec filtre anti-retour. Les narines du mannequin professionnel Prestan peuvent être pincées.

CIRCULATION

Le mannequin professionnel Prestan est doté d'un cou entièrement formé pour simuler la vérification du pouls carotidien.

DECONTAMINATION

Tous les matériaux composant le mannequin professionnel Prestan peuvent être nettoyés et décontaminés. Utilisez pour cela des lingettes de type WIP ANIOS. Il est recommandé d'utiliser ces nettoyants avec précaution et avec un minimum d'abrasion pour garantir la durée de vie de la peau. Les voies respiratoires ne sont pas réutilisables.

MATERIEL

Le mannequin professionnel Prestan a été testé en effectuant 500.000 compressions thoraciques et 50.000 inclinaisons de la tête/redressement du menton sans que cela entraîne la moindre détérioration visible des composants ni aucune altération des performances. Le mannequin professionnel Prestan, les composants et sous-composants ne contient PAS DE LATEX.

POIDS ET DIMENSIONS

- Poids du mannequin professionnel Prestan : environ 2,2 kg.
- Les dimensions du mannequin constituent une représentation réaliste de la taille et de la forme d'un être humain adulte.